


HØJDEBEGRÆNSER TIL GULDMANN GB4 PLEJESENG

Ved montering af VENDLET V5 eller VENDLET V5+ på Guldmann's GB4 plejeseng opstår der typisk det problem, at VENDLET-systemets aktuatorer støder mod sengens hjul eller fodbremse, når sengen sænkes til lav højde.

Vendlet har derfor udviklet en højdebegrænser, der kan monteres på et af VENDLET-systemets aktuatorben. Højdebegrænseren består af et beslag, en switch og to kabler. Den sikrer, at sengens nedadgående bevægelse stopper, inden VENDLET-systemets aktuator rammer sengens hjul eller fodbremse.

Monteringsvejledning

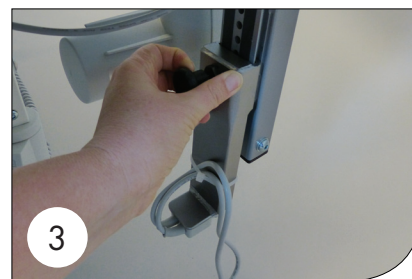

1. Højdebegrænser bestående af et beslag, en switch og to kabler (varenr. 6000040).
2. Før beslaget op i skinnen på bagsiden af et af de aktuatorben, der sidder i sengens hovedende. 3. Træk den sorte knap ud og lad beslaget falde i hak i anden nederste hul.



4. I sengens nederste ramme sidder sengens højdeaktuator. Afmonter strømstikket til sengens højdeaktuator. 5. Sæt han-stikket fra switchen i hun-stikket på sengens højdeaktuator. 6. Sæt hun-stikket fra switchen i han-stikket fra sengens kontrolenhed.

Tjek om beslaget er monteret korrekt ved at sænke sengen forsigtigt, indtil switchen rører gulvet. Når switchen rører gulvet, skal senges nedadgående bevægelse slå fra.